



## Bauerfeind CoxaTrain

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

CoxaTrain führt und stabilisiert das Hüftgelenk. Sanfte Massage der Muskulatur lindert die Schmerzen; das Gangbild verbessert sich. Fingertaschen und -schlaufen erleichtern das An- und Ablegen. Die Orthese ist leicht und flach gearbeitet, sodass sie unter der Kleidung nicht aufträgt. CoxaTrain erleichtert die Bewegung und fördert so Behandlung und Selbstheilungskräfte gleichermaßen.

### Vorteile

- Lindert Hüftschmerzen bei Bewegung
- Führt und stabilisiert das Hüftgelenk und verbessert das Gangbild
- Entspannt die Muskulatur der Lenden-Becken-Hüftregion



### 01 Lindert Schmerzen in der Lenden-Becken-Hüftregion

mittels Gluteal Pad und den zwei Friktionspelotten

### 02 Entspannt die bewegungsausführende Muskulatur

mittels Exzenter-Gelenk mit Trochanter Pad

### 03 Entlastet sofort das Becken und die Iliosakralgelenke

durch zirkuläre Kompression mittels individuell einstellbare Zuggurte

### 04 Höhenverstellbare Oberschenkelbandage über die Gelenkschiene

05 Hohe Therapietreue durch atmungsaktive Materialien und die flache Bauhöhe

06 Leichtes Anlegen durch praktische Fingerschlaufen

### Besseres Gangbild durch weniger Schmerzen

Hüftgelenksarthrose, rheumatoide Arthritis oder das sogenannte Impingement-Syndrom können heftige Schmerzen beim Gehen verursachen. Das beeinträchtigt das Gangbild bis hin zum sichtbaren Hinken. Die CoxaTrain führt das Hüftgelenk stabilisierend und massiert sanft die Muskulatur. Das führt zu einer spürbaren Entlastung und Schmerzlinderung.

Eine verstellbare Bandage aus atmungsaktivem, elastischen Material umschließt den Beckenring, eine weitere den Oberschenkel. Die beiden sind verbunden durch eine flache, stützende Gelenkschiene aus Aluminium. Die führt und unterstützt die Bewegung des Beins beim Gehen. Bei Bedarf kann damit auch der Bewegungsspielraum nach vorn und/oder hinten begrenzt werden. Zwei spezielle Druckpolster (Pelotten) massieren den Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Becken. Ein weiteres Polster, genannt Trochanter Pad, bewegt sich beim Gehen über dem großen Rollhügel (dem Vorsprung des Oberschenkelknochens) auf und ab. So wirkt es auf die Sehnenansätze und lindert Schmerzen. Hüftpatienten kennen den ähnlichen Effekt, wenn sie mit den Fingern selbst auf diesen Punkt drücken, um sich zu entlasten. Gleichzeitig wird dadurch die Sensomotorik angesprochen. Das Gluteal Pad massiert Triggerpunkte am oberen seitlichen Becken. All dies wirkt entspannend auf die Hüftmuskulatur.

### Schneller wieder fit

Die Orthese ist leicht und flach gearbeitet, so dass sie unter der Kleidung praktisch nicht aufträgt. Fingertaschen und -schlaufen erleichtern das An- und Ablegen. Die CoxaTrain erleichtert nicht nur das tägliche Gehen. Sie unterstützt auch die Physiotherapie. So fördert sie Behandlung und Selbstheilungskräfte gleichermaßen, und Sie kommen schneller wieder auf die Beine: Bewegung ist gesund!

*Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere Fragen zu den Versorgungsmöglichkeiten haben. Unsere zertifizierten Techniker(Innen) beraten Sie gerne unter 0 21 62 / 3 73 970.*